



Gebrauchsanweisung

EyeMedica® EUPHRASIA AUGENTROST Augen-Tropfen Medizinprodukt

BESCHREIBUNG

EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen bilden einen sterilen, konservierungsmittelfreien, viskoelastischen, klaren Schutzfilm für die Hornhaut. **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** enthalten Hyaluron (Natriumhyaluronat), das Natriumsalz der Hyaluronsäure, das aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaft einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Schutzfilm auf der Hornhaut bildet, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus enthalten die Augentropfen einen Auszug der Pflanze Euphrasia (= Augentrost), die auf heimischen Wiesen zu finden ist. Der Inhaltsstoff Euphrasia dient dabei zusätzlich der Stabilisierung der Oberflächenspannung des Feuchtfilms auf der Hornhaut.

Dadurch bewirken **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** langanhaltende Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge.
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- bei strapazierten Augen, z. B. bei der Arbeit an Computerbildschirmen, Mikroskopen sowie bei langen Autofahrten.
- Außerdem eignen sie sich zur Anwendung bei saisonalen und ganzjährigen Allergien, z. B. Pollen, Hausstaub und Tierhaare.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich.


ANWENDUNGSGEBIET

Augentropfen zur verbesserten Befeuchtung, Linderung und Pflege trockener und gereizter Augen.

DOSIERUNGSANLEITUNG UND ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist (1). Zum Öffnen drehen (nicht ziehen) Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (2). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3 – 5-mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges (3). Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

Frei von Konservierungsmitteln.

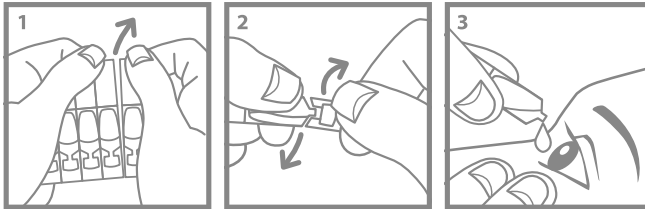

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat, Carbomer, Euphrasia, Mannitol, Wasser für Injektionszwecke

PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: 30 x 0,4 ml Ein-Dosis Behältnisse

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge nicht mit dem Ein-Dosis-Behältnis berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** keine Konservierungsmittel enthalten, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wiederhergestellt ist.
- Verwenden Sie **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses ist auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel eingepreßt.
- Weiche Kontaktlinsen müssen Sie vor der Anwendung entfernen und dürfen diese frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.

SONSTIGE HINWEISE

Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen. Vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis und der Faltschachtel-Unterseite aufgedruckt. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER PACKUNG



Hersteller



Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigelegte Gebrauchsanweisung



Lagerungstemperatur



Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis



Nur zum Einmalgebrauch



Aseptische Herstellung



Chargennummer



Verfalldatum

Stand der Information: 01.2020



Hersteller:

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
D-92251 Stulln



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt

511.1_REV02/G01