



Gebrauchsanweisung

EyeMedica® TROCKEN + MÜDE Augen-Geltröpfen

Medizinprodukt mit Natriumhyaluronat 0,3 %

BESCHREIBUNG

EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltröpfen bestehen aus natürlichen, biologischen Substanzen. Sie enthalten Natriumhyaluronat, das Natriumsalz der Hyaluronsäure, das die Augenoberfläche intensiv befeuchtet und gleitfähig macht (Tränenfilm stabilisierend). Durch die hohe Wasserbindungskapazität von Natriumhyaluronat werden zudem gestresste, überanstrengte Augen erfrischt. Aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaft bildet es außerdem einen sterilen, gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Schutzfilm auf der Hornhaut, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen.


Dadurch bewirken **EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltröpfen** eine lang anhaltende Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit:

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge.
- Überanstrengung (Sehstress) und intensives Sehen z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.
- Umwelteinflüssen, z. B. durch den Luftzug von Klimaanlage und Auto gebläsen, trockene Heizungsluft, Kälte, Wind.
- altersbedingter Trockenheit der Augen.

Die 100 % konservierungsmittelfreien **EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltröpfen** sind auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. **EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltröpfen** sind für Träger von harten und weichen Kontaktlinsen geeignet.

ANWENDUNG

Zum Öffnen der Flasche entfernen Sie den Sicherheitsring durch Ziehen an der vorgefertigten Lasche, bis dieser komplett entfernt ist (1). Danach heben Sie die Kappe durch Ziehen nach oben ab (2). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab (3). Halten Sie die Flasche mit der Tropföffnung nach unten und geben Sie durch kräftigen, länger anhaltenden Druck 3 – 5 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges (4). Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Flaschenboden entfernt werden. Setzen Sie nun die Kappe durch leichten Druck wieder auf die Flasche auf (5). Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

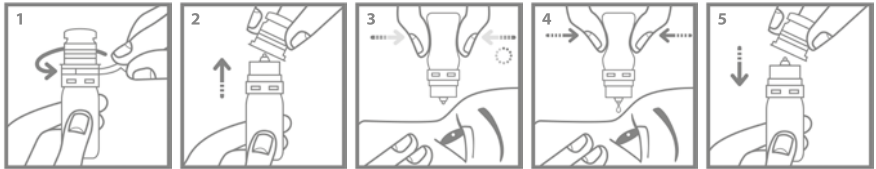

Das spezielle, innovative Sterilfilter-System der Flasche bedingt allerdings auch, dass nach jeder Entnahme einige Sekunden Wartezeit ohne Druck auf die Flasche verstreichen müssen, damit wieder genügend Luft einströmen kann. Ohne diese Wartezeit ist die weitere Entnahme nur erschwert möglich. Aufgrund physikalischer Gegebenheiten des Luftfiltersystems ist mit zunehmender Entleerung der Flasche etwas mehr Druckaufwand erforderlich.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumhyaluronat 0,3 %, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Citronensäure, Wasser für Injektionszwecke

PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: 1 x 10 ml. 10 ml = ca. 165 Anwendungen

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.
- Mit der Tropföffnung der Flasche das Auge nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltröpfen** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums, das Sie auf der Flasche sowie der Faltschachtel finden.
- Nach dem ersten Öffnen die Augentropfen nicht länger als 12 Monate anwenden. Aufgrund des speziellen, innovativen Sterilfilter-Systems kann nicht die gesamte Menge der Lösung entnommen werden.

LAGERUNG

Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Flasche vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.



BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER PACKUNG:



Hersteller



Bitte Gebrauchsinformation beachten



Temperaturbegrenzung



Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring



Sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechnik



Chargencode



Verwendbar bis

Stand der Information: April 2018



Hersteller:

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln, Deutschland

CE 0483

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
60549 Frankfurt, Deutschland

035_REV04